

# FICHE TECHNIQUE



## ALCOGRAD

Test d'alcoolémie à usage unique

**L'Alcograd vous permet de savoir si vous dépassez la limite légale permise pour la conduite d'un véhicule en quelques minutes!**

### UNE INNOVATION!


**Une couleur différente pour chaque taux d'alcool!**

**Il vous indique clairement si vous êtes à 0,00, 0,02, 0,05 ou 0,08!**

**L'Alcograd est certifié TÜV et est approuvé par la FDA et MADD Canada.**

Ce test d'alcoolémie peu coûteux peut servir autant aux particuliers qu'aux entreprises qui désirent s'assurer que leurs employés et invités retournent à la maison en toute sécurité.

Il peut être utilisé en diverses occasions et événements corporatifs tels que fêtes de bureau, tournois de golf, 5 à 7, cocktails, etc.

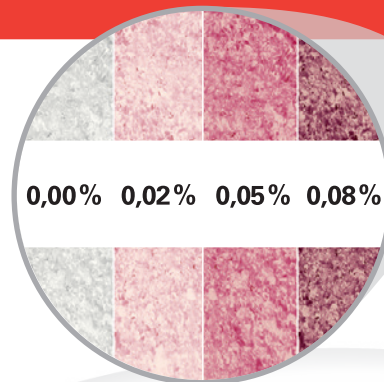

### AVANTAGES

- » Efficace
- » Facile à interpréter : une couleur différente pour chaque taux d'alcool
- » Économique
- » Offre une paix d'esprit
- » Aucune calibration nécessaire
- » Peut sauver des vies et prévenir des accidents
- » Petit et discret, il se glisse facilement dans la poche d'une chemise ou un sac à mains.

### CARACTÉRISTIQUES

- » Dimensions : 10 cm de longueur x 1 cm de diamètre (diamètre d'un crayon)
- » Poids : 6,0 grammes
- » Précision : seulement  $\pm 2\%$  de marge d'erreur
- » Résultat : apparaît en 4 minutes
- » Délai après la dernière prise d'alcool : attendre 20 minutes après la dernière consommation
- » Délai après avoir fumé : attendre 5 minutes après la dernière cigarette
- » Durée de vie : inscrite sur l'emballage (environ 18 mois)

### FONCTIONNEMENT

Facile d'utilisation : après avoir pressé les deux extrémités pour percer l'aluminium, il suffit de souffler dans le tube et d'attendre de 4 minutes pour interpréter le résultat.